

Neues Testverfahren für Cortisol im Speichel ab 18.03.2019 Umstellung des Entnahmematerials

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

zum 18. März 2019 wird unser aktueller Test zur Bestimmung von Cortisol im Speichel umgestellt. Der neue Test der Firma IDS wurde speziell für die Bestimmung von Cortisol im Speichel entwickelt und zeigt eine deutlich bessere Sensitivität sowie eine verbesserte Spezifität. Dadurch wird es uns in Zukunft möglich sein, vor allem im niedrigen Wertebereich, noch genauere Ergebnisse zu erzielen. Dies ist insbesondere für das Aufdecken von Mangelzuständen hilfreich. **Bitte beachten Sie die neuen Referenzbereiche auf dem Befundbericht.**

Das neue Entnahmematerial: Salivetten®

Für den neuen Test müssen die Speichelproben in Salivetten® gesammelt werden, nicht wie bisher in Salicaps. Die Salivette® der Firma Sarstedt stellen wir Ihnen ab sofort über unsere Einsenderbetreuung zur Verfügung.

Ihr Kontakt zu unserer Einsenderbetreuung:

Telefon: 0751 502-40

Telefax: 0751 502-45

E-Mail: einsenderbetreuung@labor-gaertner.de

Anleitung zur Speichelgewinnung mit Salivetten®:

Zur Speichelgewinnung öffnen Sie die blaue Verschlusskappe der Salivette® und entnehmen die Saugrolle. Diese Saugrolle sollte für ca. 60 Sekunden im Mund behalten werden, bis sie sich mit Speichel vollgesaugt hat. Leichte Kaubewegungen regen hierbei den Speichelfluss an. Anschließend wird die speichelfeuchte Saugrolle wieder in die Salivette® zurückgegeben und diese wieder fest verschlossen. Der so gewonnene Speichel ist bei Raumtemperatur bis zu 4 Tage stabil, sollte aber dennoch im Kühlschrank gelagert werden.

Bitte beachten Sie, dass ca. 30 Minuten vor der Speichelgewinnung auf Essen, Trinken, Rauchen, Zähneputzen sowie das Kauen von Kaugummi verzichtet werden sollte.

LEISTUNGSDATEN

- ▶ **Methode:**
Chemilumineszenzassay (CLIA)
IDS-iSYS Salivary Cortisol
- ▶ **direkter Messbereich:**
0,6 – 82,8 nmol/l
- ▶ **Material:**
Salivetten®-Speichel



Sollten Sie Fragen zu Cortisol im Speichel, zur neuen Methode oder zur Verwendung der Salivetten® haben, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Für das MVZ Labor Ravensburg

Frau Dr. med. Simone Halder
Ärztliche Leitung Fachbereich Endokrinologie
Telefon: 0751 502-253

Herr Dr. rer. nat. Marc Müller
Wissenschaftlich-technische Leitung Endokrinologie
Telefon: 0751 502-266